

血圧管理ソフトのインストールのしかた

1. ダウンロードした、血圧管理ソフトのインストーラ (ketsuatsu_setup) をダブルクリックする。
2. 血圧管理ソフト (Blood Pressure Management Software) のインストール画面が表示されたら、[次へ] ボタンをクリックする。
3. インストールの確認画面が表示されたら、[インストール] ボタンをクリックしてインストールを続行する。
4. ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、[許可] をクリックする。
5. インストール完了の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックする。

血圧管理ソフトの動作環境について

- 血圧管理ソフトは、Microsoft Windows XP(SP2 以上)/Vista/Windows7/Windows8.1/Windows10 に対応しています。それ以外の OS には対応していません。
- 画像解像度 1028×768 ピクセル以上のディスプレイのパソコンをご使用ください。
- 血圧管理ソフトのインストール先は C ドライブ限定になります。
C ドライブには、1.5MB 程度の空き容量が必要です。